

**ADVIA® Chemistry**  
Systems

## „Chemistry Calibrator“

REF	Turinys	
09784096 (T03-1291-62)	12 liofilizuoto „Chemistry Calibrator“ buteliukų 12 x 0,28 g → 12 x 3,0 mL	<b>CHEM CAL</b>

**Pastaba** Ištirpinus iš šio rinkinio bus gauta 12 x 3,0 ml „Siemens Chemistry Calibrator“.

### Paskirtis

„Chemistry Calibrator“ skirtas *in vitro* diagnostikai atlikti kalibruojant „ADVIA® Chemistry“ sistemų cheminius tyrimus.

### Kalibravimo medžiagos aprašas

<b>Kiekis</b>	0,28 g buteliuke
<b>Tirpinimo tūris</b>	3,0 ml buteliukas (dejonizuotame H <sub>2</sub> O)
<b>Sudedamosios dalys</b>	Liofilizuotas jaučio serumas, analitės ir konservantas
<b>Laikymas</b>	2–8°C. Saugokite nuo šviesos ir karščio.
<b>Savybių pastovumas</b>	<p><b>Neatidarius:</b> iki buteliuko etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.</p> <p><b>Pastaba.</b> Normalus gliukozės irimas yra maždaug 2% per metus. Rekomendacijų žr. toliau pateiktose instrukcijose <i>Gliukozės tyrimų kalibravimas</i>.</p> <p><b>Atidarius:</b> 48 valandos uždarius ir laikant 2–8°C (išskyrus bendrojo ir tiesioginio bilirubino, kurie yra stabilūs 8 valandas uždarius ir laikant 2–8°C)</p>



#### DEMESIO

Šiame įrenginyje yra gyvūninės kilmės medžiagų, todėl su juo reikia elgtis kaip su potencialiu ligos sukėlėju ir pernešėju.

Tinkamų tyrimų sąrašą ir kiekvieno tyrimo konkrečią „Siemens Chemistry Calibrator“ partijos vertę žr. dokumente „ADVIA Chemistry“ sistemų priskirtosios kalibravimo medžiagų vertės, pridėtame prie kiekvieno kalibravimo medžiagos rinkinio.

Saugos duomenų lapus (MSDL/SDL) galima gauti adresu [www.siemens.com/diagnostics](http://www.siemens.com/diagnostics).

Skirta *in vitro* diagnostikai.

## Kalibravimo medžiagos paruošimas

1. Papurtykite, kad suardytumėte liofilizuotą sluoksnį. Nuimkite metalinį sandariklį ir atidarykite buteliuką.
2. Volumetrine pipete į buteliuką įlašinkite lygiai 3,0 ml dejonizuoto vandens. Uždėkite dangtelį.
3. Atitinkamai atlikite 3a arba 3b veiksmą.
  - a. Sumaišykite patys apversdami buteliuką 10 kartų kas 10 minučių per 30 minučių laikotarpį arba tol, kol tirpinimas bus baigtas.
  - b. Sumaišykite mechaniškai rotacinėje maišyklėje 30 minučių arba tol, kol tirpinimas bus baigtas.
4. Prieš naudodami švelniai sumaišykite apversdami mažiausiai 5 kartus, kad užtikrintumėte homogeniškumą.
5. Žr. tyrimo naudojant kalibravimo medžiagas sistemoje instrukcijas.
6. Užšaldykite nenaudojamą medžiagą. Prieš naudodami pakartotinai kruopščiai sumaišykite sudedamąsias dalis.

## Gliukozės tyrimų kalibravimas (GLUH\_3, GLUH\_c, GLUO, GLUO\_c)

Gliukozės kalibravimo medžiagų vertės laikui bėgant keičiasi. Žr. dokumentą „ADVIA Chemistry“ sistemų priskirtosios kalibravimo medžiagų vertės, pridėtą prie kiekvieno „Siemens Chemistry Calibrator“ rinkinio.

Yra penki pirmiau išvardytiems „ADVIA Chemistry“ gliukozės rinkiniams taikomi lygiai, nustatyti pagal datą. Naudokite kalibravimo medžiagos metų ir mėnesio vertę (MMMM/mm), einančią prieš naudojimo datą. Tada keiskite kalibravimo medžiagos vertę pagal dokumente pateiktas datas ir vertes.

Pavyzdys. Jei kalibravimo medžiagą naudojate tarp sausio 1 d. ir birželio 30 d., naudokite sausio mėn. vertę. Kalibruodami po birželio 30 d., naudokite liepos mėn. vertę.

## Išmetimas




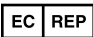











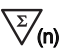






Pavojingas ir biologiškai užterštas medžiagas išmeskite laikydamiesi įstaigos praktikos reikalavimų. Visas medžiagas išmeskite saugiu ir priimtinu būdu bei laikydamiesi visų federalinių, šalies ir vietos reikalavimų.

## Standartizacija

Vertės susietos su kiekvieno tyrimo standartu. Papildomos informacijos žr. atskirų tyrimų naudojimo instrukcijų dokumentuose.

## Simbolių Paaškinimas

Ant produkto etiketės gali būti toliau pateikti simboliai:

Simbolis	Apibrėžimas	Simbolis	Apibrėžimas
	<i>In vitro</i> diagnostinis medicininis įrenginys	 REF	Katalogo numeris
	Oficialus gamintojas		Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
	CE ženklas		CE ženklas su notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeriu
	Žr. naudojimo instrukcijas		Biologinis pavojus
	Saugoti nuo saulės šviesos ir karščio		Temperatūros apribojimas
	Apatinė temperatūros riba		Viršutinė temperatūros riba
	Neužšaldykite (> 0°C)		Aukštyn
	Tinka naudoti iki		Kiekio pakanka (n) tyrimų atlikti
	Perdirbti		Atspausdinta sojų rašalu
Rev.	Peržiūra	YYYY-MM-DD	Datos formatas (metai-mėnuo-diena)
	Partijos kodas		Tirpinimo tūris
	Įprasti vienetai		SI vienetai

## Techninė pagalba

Dėl klientų aptarnavimo kreipkitės į vietinį techninės pagalbos specialistą arba platintoją.

[www.siemens.com/diagnostics](http://www.siemens.com/diagnostics)

ADVIA yra „Siemens Healthcare Diagnostics“ prekės ženklas.

© 2008 „Siemens Healthcare Diagnostics“. Visos teisės saugomos.

US Pats 4,339,533; 4,438,302

Made in: USA



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591-5097 USA



Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.  
Sir William Siemens Sq.  
Frimley, Camberley, UK GU16 8QD

**Global Siemens  
Headquarters**

Siemens AG  
Wittelsbacherplatz 2  
80333 Muenchen  
Germany

**Global Siemens  
Healthcare Headquarters**

Siemens AG  
Healthcare Sector  
Henkestrasse 127  
91052 Erlangen  
Germany  
Phone: +49 9131 84-0  
[www.siemens.com/healthcare](http://www.siemens.com/healthcare)

**Global Division**

Siemens Healthcare  
Diagnostics Inc.  
511 Benedict Avenue  
Tarrytown, NY 10591-5097  
USA  
[www.siemens.com/diagnostics](http://www.siemens.com/diagnostics)