

Svarbi informacija – perskaitykite prieš naudodami

Paskirtis

○ THUNDERBEAT perdavėjas

1 poz. —
5 poz. —

THUNDERBEAT perdavėjas (TD-TB400) skirtas naudoti su ultragarsiniu generatoriumi (USG-400), elektrochirurginiu generatoriumi (ESG-400) ir THUNDERBEAT atliekant atvirąsias, laparoskopines (įskaitant vieno organo operaciją) ir endoskopines chirurgines operacijas, kai reikia pjauti minkštuosius audinius (atlikti disekciją) arba atlikti jų koaguliaciją arba atlikti kraujagyslių ligavimą (sandarinimą ir pjovimą).

○ SONICBEAT perdavėjas

SONICBEAT perdavėjas (TD-SB400) skirtas naudoti su ultragarsiniu generatoriumi (USG-400) ir SONICBEAT atliekant atvirąsias, laparoskopines (įskaitant vieno organo operaciją) ir endoskopines chirurgines operacijas, kai reikia pjauti minkštuosius audinius (atlikti disekciją) arba atlikti jų koaguliaciją arba atlikti kraujagyslių ligavimą (sandarinimą ir pjovimą).

2.3 Specifikacijos

Aplinka

Darbinė aplinka	Aplinkos temperatūra	10–40 °C (50–104 °F)
	Santykinė drėgmė	30–85%
	Atmosferos slėgis	70–106 kPa
	Aukštis	3000 m arba mažesnis
Transportavimo ir laikymo sąlygos	Aplinkos temperatūra	nuo –40 iki +60 °C (nuo –40 iki +140 °F)
	Santykinė drėgmė	10–90%
	Atmosferos slėgis	70–106 kPa

Specifikacijos

Elementas		Specifikacija	
Modelis		TD-TB400	TD-SB400
Ultragarso išvestis	Dažnis	47 kHz	— 3 por
Dydis	Išorinis skersmuo	Ø 33 mm	Ø 31 mm
	Svoris	60 g (Neįskaitant perdavėjo laido ir perdavėjo kištuko)	
	Perdavėjo laido ilgis	3100 mm	— 2 por
Matuojama aukštojo dažnio (RF dvipolė) įtampa		229 Vp	—
Eksplotavimo ciklas (įprastas ciklas)		I JUNGTA: 5 s/IŠJUNGTA: 10 s	

○ Suderinamų metodų ir cheminių priemonių sąrašas

Šioje lentelėje nurodomos valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo procedūros bei priemonės, kurių naudojimas su perdavėjo komponentais ir jo priedais buvo kruopščiai patikrintas.

	Patvirtinti metodai, atsižvelgiant į biologinį efektyvumą ir medžiagų patvarumą					Patvirtintas metodas, atsižvelgiant į medžiagų patvarumą		
	Sterilizavimas garais 132–134 °C, 5 min, parengiamasis apdorojimas vakuumu					Sterilizavimas žemos temperatūros garu ir formaldehidu		
	Sterilizavimas etileno oksido garais					Automatinis valymas/dezinfekavimas		
	Dezinfekavimas					STERRAD® 50/100S/200/NX		
	Ultragarsinis valymas							
	Valymo priemonė							
THUNDERBEAT perdavėjas (TD-TB400)	○	-	○	-	○	4 poz.	○	-
SONICBEAT perdavėjas (TD-SB400)						-	○	-
Valymo šepetėlis (A0451, MH-507)	○	○	○	-	○	-	○	-

○ suderinama – nesuderinama

5.1 lentelė